

Quick manual dubbelklik module Xbox / Horiflex

De dubbelklik module is een module die een dubbelklik kan uitvoeren met maar 1 druk op de knop.


Dit is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking die niet is staat zijn om 2x snel achter elkaar op een knop te kunnen drukken.

De module werkt i.c.m de Xbox adaptive en de Horiflex controller.



De module bestaat uit een klein zwart boxje met een USB kabel met A stekker en een los meegeleverd kabelaasje met 2x een 3,5 mm jack stekker.

Sluit de module aan zoals aangegeven in het onderstaande schema.

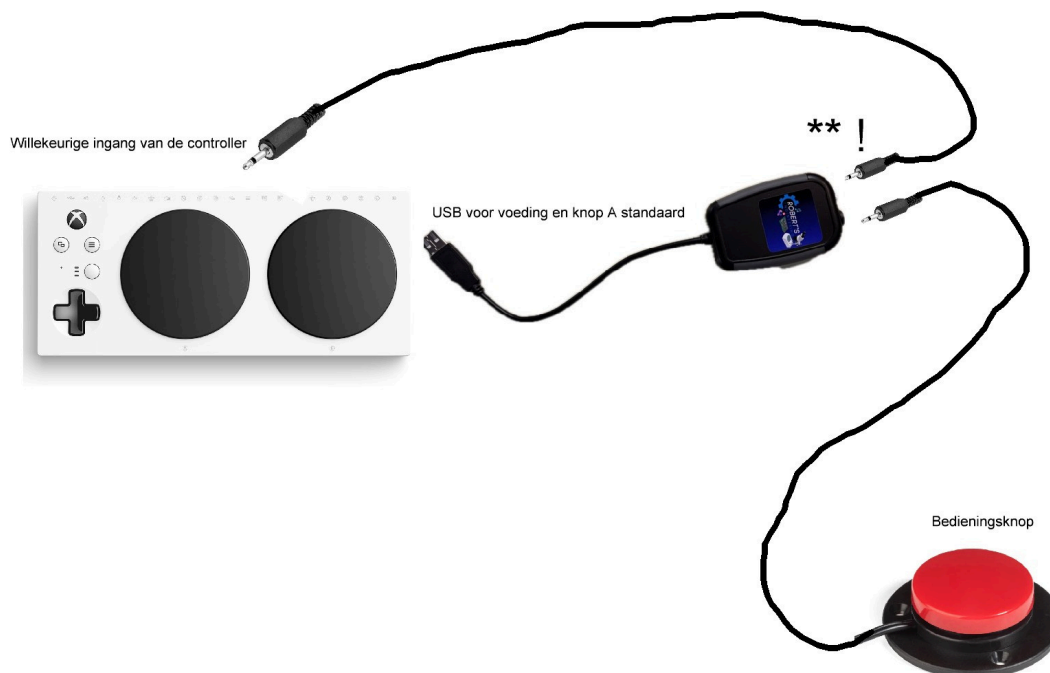

** ! Indien deze kabel niet is aangesloten, zal knop A altijd via de USB kabel op de rode knop reageren.

** ! Haal de stekker uit de module om knop A via de USB te laten werken.

Deze module geeft een dubbelklik op de knop A van de standaard settings in de adaptive controller van de Xbox.

Indien je het losse kabeltje aansluit op een van de ingangen op de adaptive controller, kan je de dubbelklik aanbieden op een van die ingangen waar die op aangesloten zit.

De interne knop A is dan niet meer actief.

LET OP !! dit werkt alleen op de Xbox Adaptive controller.

De module werkt ook op de Horiflex controller voor de Nintendo.
Alleen moet dan altijd het los meegeleverde kabeltje gebruikt worden.

Zie onderstaande schema.



Voor meer info of speciale aanpassingen mail naar:

Info@RobertsEngineering.nl

